

Vigtig information om hærdelampe FlashMax P3

Kære klinikpersonale og FlashMax P3-bruger

Vi gør opmærksom på vigtigheden af at bruge covers og spidser til FlashMax P3 hærdelampen. FlashMax P3 er designet og testet til, at man skal anvende covers og spidser – 4 eller 8 mm spidser – hver gang, man hærdet med lampen. Covers og spidser sikrer, at der kommer den rette lysmængde ud af lampen, og at den energi, der bliver afsat i materialet under hærdeprocessen, giver en komplet hærkning af komposit og bonding – hver gang.

Desuden har covers og spidser de funktioner, at de beskytter lampen og forhindrer, at der kommer spyt og væsker ind i lampen og dermed også forhindrer krydskontaminering. Covers og spidser er engangsudstyr og bør derfor skiftes mellem hver patient. Spidserne skal være helt rene og fri for komposit og/eller bondingrester, da kompositrester og fedt fra huden kompromitterer den mængde lys, der kommer ud af lampen og dermed hærningen af materialet.

I de fleste tilfælde, hvor man bygger en kavitet op lagvis og/eller i bulk, anvendes 8 mm spidsen. I tilfælde af cervikale fyldninger og/eller ved meget dybe kaviteter kan det være nemmere at anvende 4 mm spidsen.

For at opnå den bedste hygiejne er der mulighed for at købe overtrækspose til lampen. De er specialdesignede til netop FlashMax P3-lampen og fås både som åbne og lukkede.

Det er også vigtigt at beskytte øjnene for det blå lys. Især hvis man arbejder med hærdelys flere gange om dagen, 5 dage om ugen. Det gøres nemmest ved at anvende en håndholdt beskyttelseskærm til det blå lys eller beskyttelsesbriller til det blå lys.

Mvh. Dental Kompagniet og CMS Dental